

CAMPIONI BIOLOGICI

Per le analisi genetiche possono essere inviate a scelta una delle seguenti matrici:

Sangue in EDTA: almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente la provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento della spedizione.

Carte FTA® Whatman: consiste in una speciale cartina su cui è possibile dispensare direttamente una goccia di sangue ottenuta pungendo il labbro o l'orecchio dell'animale; asciugare all'aria la cartina e conservare a temperatura ambiente.

Tampone buccale consiste in un normale tampone in cotone oppure del tipo "citobrush" a spazzolina. La testa del tampone o del citobrush deve essere sfregato ripetutamente per almeno 10 sec e vigorosamente sulla gengiva poi asciugato all'aria per qualche minuto ed infine riposto nel contenitore.

FTA® è un marchio registrato da Whatman Inc.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RELATIVA A TAMPONI/BRUSH SPEDITI PER ANALISI GENETICHE

In caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno subire prolungamenti. Nel caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il campione, la prima ripetizione dell'analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla seconda ripetizione sarà imputato l'intero costo dell'analisi.

IDENTIFICARE IL CAMPIONE BIOLOGICO

N.B.: IMPORTANTISSIMO! Identificare la provetta di sangue EDTA o la cartina in modo inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da evitare confusione e scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA

Compilare l'apposito modulo di richiesta ANFI, uno per ciascun soggetto da sottoporre ad analisi. Barrare una o più caselle relative all'analisi richiesta. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal veterinario e dal proprietario. Barrare la richiesta esame corrispondente. Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.genefast.com o richiesto all'indirizzo info@genefast.com

NOTA PRELEVATORE

Nel caso in cui il campione non sia stato prelevato da medico veterinario iscritto all'ordine o da delegato ANFI, il referto riporterà la dicitura "Prelievo non certificato".

URGENZA

Per le analisi con carattere di urgenza i risultati saranno disponibili in 5 gg lavorativi. Il costo in urgenza subirà una maggiorazione del 30%, solamente nel caso in cui saranno effettivamente rispettati i tempi indicati.

PACKAGING ED INVIO DEI CAMPIONI

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere convenzionato o posta prioritaria.

Il campione biologico deve essere avvolto da materiale assorbente e posto in **contenitore secondario** a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a vite). Il contenitore secondario deve essere posto all'interno di un **contenitore terziario** in materiale isolante tipo scatola di polistirolo oppure nella classica busta gialla con materiale antiurto.

All'interno oltre al campione inserire:

1 il modulo richiesta ANFI compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario 1 per ciascun animale da sottoporre ad analisi.

2 fotocopia di documento di identità'

Il corriere convenzionato con il laboratorio è Gls-Executive; il cliente che intende avvalersi della convenzione del laboratorio Genefast deve indicare sulla lettera di vettura PORTO ASSEGNATO e dovrà pagare, insieme al costo del deposito del campione biologico, un costo aggiuntivo per la spedizione pari a 7,86 euro (per Sardegna e Sicilia 10,29 euro) IVA inclusa.

SPEDIRE TRAMITE CORRIERE (l'ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì) oppure TRAMITE POSTA PRIORITARIA (si consiglia di spedire nei primi giorni della settimana e comunque non oltre il mercoledì)

A: GENEFAST, Via Castelfranco 17/D 40053 Bazzano Bologna tel: 051/833404

GENEFAST srl

TARIFFE

Come da offerta ANFI

**MODALITA' DI
PAGAMENTO**

Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl: Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
codice IBAN **IT59X0538766700000001190065** indicando sulla causale il numero di
fattura

GENEFAST SRL

VIA CASTELFRANCO 17/D 40059 BAZZANO (BO) ITALY
TEL. 051 833404 – FAX 051 6729160 – CELL. 335 1918052 – EMAIL: INFO@GENEFAST.COM
WWW.GENEFAST.COM – PI 02851890964