

# DIAGNOSI DI CLAMIDIOSI

**Genefast**

**genetic solutions**

Soluzioni biotecnologiche e genetiche applicate alla diagnostica molecolare veterinaria e all'industria alimentare.

Genefast  
Via della Pace 33/a  
41051 Castelnuovo Rangone  
Modena  
Tel.: +39 59 536710  
Fax: +39 59 536710  
[www.genefast.com](http://www.genefast.com)  
E-mail: [info@genefast.com](mailto:info@genefast.com)

## SCELTA DELLA MATRICE

**CHLAMIDOPHYLA FELIS:** la scelta della matrice è funzione dei sintomi osservati. I migliori risultati sono ottenuti quando il prelievo è effettuato alla comparsa dei sintomi.

### SINTOMI

Congiuntivite

Disturbi apparato respiratorio (prime vie)

Aborti

### MATRICE DI ELEZIONE

Tampone congiuntivale in provetta sterile senza EDTA

Tampone nasale o faringeo in provetta sterile

Tampone vaginale in provetta sterile

**Genefast**

**genetic solutions**

Soluzioni biotecnologiche e genetiche applicate alla diagnostica molecolare veterinaria e all'industria alimentare.

TECNICA REAL TIME PCR  
PATOGENO: BATTERIO  
AMPLIFICAZIONE DEL DNA

**RISULTATO POSITIVO:**  
NEL CONTESTO CLINICO DELLA PATOLOGIA CONFERMA LA DIAGNOSI

**RISULTATO NEGATIVO:**  
L'ASSENZA DEL DNA DEL PATOGENO CONSENTE DI ESCLUDERE LA MALATTIA IN FUNZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CAMPIONE UTILIZZATO.

## CONDIZIONI DI SPEDIZIONE

I campioni devono essere inviati al laboratorio il giorno del prelievo. In caso contrario la conservazione si può effettuare a 4°C o, per periodi più prolungati, previo congelamento a -20°C. Evitare di congelare e scongelare ripetutamente i campioni.